

RAYCARE 6A

Istruzioni per l'uso



RayCare



Traceback information:
Workspace Main version a723
Checked in 2022-06-21
Skribenta version 5.4.033

Dichiarazione di conformità



Conforme alla normativa Medical Device Regulation (MDR) 2017/745. Una copia della relativa Dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta.

Notifiche di sicurezza

Questa documentazione per l'utente contiene AVVERTENZE riguardanti l'uso sicuro del prodotto che devono essere rispettate accuratamente.



AVVERTENZA!

Il segnale di avvertenza generico segnala un rischio di danno fisico. Nella maggior parte dei casi, il rischio è correlato ad un errato trattamento del paziente.

Nota: *La nota fornisce informazioni aggiuntive relative ad un argomento specifico, ad esempio aspetti da considerare quando si esegue una determinata fase di un'istruzione.*

Copyright

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un consenso scritto preliminare da parte di RaySearch Laboratories AB (publ).

Tutti i diritti riservati. © 2022, RaySearch Laboratories AB (publ).

Materiale stampato

Su richiesta sono disponibili copie cartacee dei documenti relativi alle Istruzioni per l'uso e alle Note sulla release.

Marchi di fabbrica

RayAdaptive, RayAnalytics, RayBiology, RayCare, RayCloud, RayCommand, RayData, RayIntelligence, RayMachine, RayOptimizer, RayPACS, RayPlan, RaySearch, RaySearch Laboratories, RayStation, RayStore, RayTreat, RayWorld e il logotipo RaySearch Laboratories sono marchi di fabbrica di RaySearch Laboratories AB (publ)*.

I marchi commerciali di terzi utilizzati nel presente documento sono di proprietà dei loro rispettivi titolari, che non sono affiliati a RaySearch Laboratories AB (publ).

RaySearch Laboratories AB (publ) (incluse le sue società affiliate) viene indicata qui di seguito come RaySearch.

* Soggetto a registrazione in alcuni mercati.



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	7
1.1	Informazioni sul presente manuale	8
1.2	Documentazione RayCare	8
1.2.1	Documentazione del sistema RayCare	8
1.2.2	Altra documentazione associata	8
2	INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	9
2.1	Tipologia di dispositivo	10
2.2	Uso previsto	10
2.3	Destinatari	10
2.4	Pazienti e indicazioni previsti	10
2.5	Ambiente previsto	10
2.6	Responsabilità dell'utente	10
2.7	Hardware e sistema operativo	10
2.8	Controindicazioni	11
2.9	Contatti del produttore	11
2.10	Segnalazione di incidenti ed errori durante il funzionamento del sistema	11
2.11	Ente normativo incaricato	12
2.12	Etichetta del prodotto	12
2.13	Ciclo di vita	15
2.14	Informazioni di carattere normativo	16
3	INFORMAZIONI NECESSARIE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO	17
3.1	Formato di visualizzazione	18
3.2	Precauzioni di sicurezza	18
3.2.1	Avvertenze generali e problemi noti	19
3.2.2	Avvertenze e problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente	20
3.2.3	Avvisi e problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline	24
3.2.4	Avvertenze e problemi noti relativi alla programmazione	25
3.2.5	Avvisi e problemi noti relativi al flusso di lavoro	27
3.2.6	Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation	30
3.2.7	Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della gestione del trattamento con RayTreat e RayCommand	32
3.2.8	Avvisi e problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini	36
3.2.9	Avvisi e problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni	40
3.2.10	Avvisi e problemi noti relativi agli script	42
3.2.11	Avvertenze e problemi noti relativi all'amministrazione del sistema	43
3.2.12	Avvisi e problemi noti relativi all'ambiente di sistema	48
3.2.13	Avvertenze e problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati	50

4	ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI RAYCARE	55
5	INTEGRITÀ E SICUREZZA DEL SISTEMA	57
5.1	Monitoraggio e manutenzione del sistema	58
5.2	Backup e ripristino	58
5.3	Configurazione della sicurezza	59
INDICE		61

1 INTRODUZIONE

A proposito di RayCare

RayCare è un sistema informativo oncologico che supporta gli operatori sanitari nella fornitura di servizi di cura oncologica.

RayCare è un sistema solo software con una parte client che consente all'utente di interagire con il sistema e una parte server che esegue le funzioni di elaborazione e archiviazione necessarie.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

1.1	Informazioni sul presente manuale	p. 8
1.2	Documentazione RayCare	p. 8

1.1 INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE

Questo manuale contiene informazioni generali sul prodotto, informazioni relative alla sicurezza, istruzioni di installazione e informazioni sull'integrità e la sicurezza del sistema. Contiene inoltre note importanti sul sistema RayCare 6A. Fornisce informazioni relative alla sicurezza del paziente ed elenca i problemi noti e le possibili soluzioni.

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il sistema RayCare 6A. Il corretto funzionamento del dispositivo può essere garantito solo se le istruzioni contenute in questa guida vengono rispettate. Ogni utente di RayCare 6A deve conoscere i problemi noti descritti in questo manuale. Queste note contengono istruzioni definitive su come utilizzare il sistema RayCare 6A. Per qualsiasi domanda sul contenuto, è possibile contattare il produttore.

1.2 DOCUMENTAZIONE RAYCARE

1.2.1 Documentazione del sistema RayCare

La documentazione del sistema RayCare 6A è costituita da quanto segue:

Documento	Descrizione
<i>RSL-D-RC-6A-IFU, RayCare 6A Instructions for Use</i>	Questo manuale contiene informazioni normative e di sicurezza sul sistema RayCare 6A, oltre a un riepilogo dei problemi noti.
<i>RSL-D-RC-6A-USM, RayCare 6A User Manual</i>	Manuale che descrive le funzionalità di RayCare e vengono fornite istruzioni dettagliate per l'esecuzione delle operazioni più comuni.

1.2.2 Altra documentazione associata

- *RSL-D-RC-6A-NI, RayCare 6A News and Improvements*
- *RSL-D-RC-6A-SEG, RayCare 6A System Environment Guidelines*
- *RSL-D-RC-6A-TPL, RayCare 6A Third-Party Licenses*
- *RSL-D-RC-6A-RPDCS, RayCare 6A RayCare PACS DICOM Conformance Statement*

2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questo capitolo contiene informazioni importanti sul sistema RayCare 6A.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

2.1	Tipologia di dispositivo	p. 10
2.2	Uso previsto	p. 10
2.3	Destinatari	p. 10
2.4	Pazienti e indicazioni previsti	p. 10
2.5	Ambiente previsto	p. 10
2.6	Responsabilità dell'utente	p. 10
2.7	Hardware e sistema operativo	p. 10
2.8	Controindicazioni	p. 11
2.9	Contatti del produttore	p. 11
2.10	Segnalazione di incidenti ed errori durante il funzionamento del sistema	p. 11
2.11	Ente normativo incaricato	p. 12
2.12	Etichetta del prodotto	p. 12
2.13	Ciclo di vita	p. 15
2.14	Informazioni di carattere normativo	p. 16

2.1 TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO

RayCare è un software autonomo per sistema informativo oncologico (OIS).

2.2 USO PREVISTO

RayCare è un sistema informativo oncologico utilizzato per supportare i flussi di lavoro e la programmazione, nonché per gestire le informazioni cliniche, la pianificazione e la gestione del trattamento oncologico. RayCare può essere utilizzato per il trasferimento, l'archiviazione, la conversione e la visualizzazione dei dati del paziente in tutte le aree di cura oncologica, comprese radioterapia, oncologia medica e chirurgia oncologica.

RayCare non è destinato all'uso diagnostico.

2.3 DESTINATARI

Gli utenti previsti per il sistema RayCare sono i professionisti che operano nel settore delle cure oncologiche, tra cui personale clinico, tecnico e amministrativo.

L'accesso dei gruppi di utenti viene regolato in base alle esigenze di utilizzo definite per ciascun gruppo e anche i requisiti di insegnamento e formazione vengono definiti per gruppo. Per l'utente che utilizza il sistema deve essere prevista inoltre una formazione adeguata a livello di sicurezza.

2.4 PAZIENTI E INDICAZIONI PREVISTI

RayCare è un sistema informativo oncologico (OIS), rivolto a professionisti che gestiscono informazioni relative a pazienti per i quali è in corso o viene preso in considerazione un trattamento di radioterapia, oncologia medica e oncologia chirurgica.

2.5 AMBIENTE PREVISTO

I server RayCare si trovano nell'ambiente IT dell'ospedale. I client RayCare fanno parte della rete interna dell'ospedale o di una rete wireless sicura all'interno della struttura ospedaliera.

2.6 RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

L'organizzazione dell'utente dovrà assicurare garanzie riguardo ai punti riportati di seguito.

- Le persone autorizzate a utilizzare RayCare secondo l'uso previsto specificato devono essere adeguatamente formate per le funzioni da svolgere.
- L'utente deve essere consapevole del fatto che la qualità dell'output dipende in modo significativo dall'input dei dati e che qualsiasi irregolarità o incertezza relativa a unità di dati in ingresso, identificazione o qualità di qualsiasi altra natura deve essere oggetto di un'indagine approfondita prima che i dati vengano utilizzati.

2.7 HARDWARE E SISTEMA OPERATIVO

I client RayCare devono essere installati su PC recenti, con almeno 16 GB di RAM e una risoluzione dello schermo consigliata di 1920 x 1200 pixel (o 1920 x 1080). I client RayCare 6A possono essere utilizzati con il sistema operativo Windows 10 a 64-bit. Affinché il visualizzatore immagini funzioni correttamente, è necessario utilizzare una scheda grafica NVIDIA. Si consiglia di utilizzare le versioni

472.12 e 471.68 dei driver GPU NVIDIA o i driver più recenti pubblicati da NVIDIA con il supporto per Vulkan.

Il server RayCare deve essere installato su server con il sistema operativo Windows Server 2016 o 2019. In caso di virtualizzazione, deve essere utilizzato esclusivamente il software di virtualizzazione supportato. Per un'installazione in una struttura ospedaliera di grandi dimensioni, il server RayCare deve avere 64 GB di RAM, una CPU a 8 core e almeno 500 GB di spazio su disco. Tutti i servizi back-end RayCare devono essere configurati per l'esecuzione nella stessa istanza del server. Il server SQL deve avere 64 GB di RAM, una CPU a 8 core e almeno 1 GB di spazio di archiviazione SSD per ogni paziente.

È necessario attivare una protezione antivirus di ultima generazione per tutti i componenti del sistema, compresa la rete informatica, se presente. Devono inoltre essere previsti aggiornamenti automatici o strumenti simili per mantenere la protezione sempre aggiornata.

Il sistema deve essere utilizzato solo con computer che rispettino gli standard di sicurezza hardware applicabili in materia di guasti elettrici e radiazioni elettromagnetiche. Si consiglia di installare i Windows Service Packs (Service pack Windows) aggiornati sia sui client che sui server. I Windows Service Packs sono raccolte cumulative e testate di aggiornamenti che riguardano la sicurezza e altri elementi critici del sistema e vengono distribuite da Microsoft. È opportuno installare anche i Security Updates (Aggiornamenti sulla sicurezza), che sono correzioni delle vulnerabilità della sicurezza del sistema operativo, anch'essi distribuiti da Microsoft. Si sconsiglia l'installazione di altri tipi di aggiornamenti. Terminata l'installazione di tutti gli aggiornamenti, è necessario eseguire una verifica delle prestazioni del sistema.

2.8 CONTROINDICAZIONI

Nessuna conosciuta.

2.9 CONTATTI DEL PRODUTTORE



RaySearch Laboratories AB (publ)
Eugeniavägen 18
SE-113 68 Stockholm
Svezia
Telefono: +46 8 510 530 00
E-mail: info@raysearchlabs.com
Paese d'origine: Svezia

2.10 SEGNALEZIONE DI INCIDENTI ED ERRORI DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Per segnalare eventuali incidenti ed errori all'assistenza di RaySearch, contattare l'indirizzo e-mail: support@raysearchlabs.com oppure telefonicamente il distributore italiano.

Eventuali incidenti gravi verificatisi e connessi al dispositivo devono essere segnalati al produttore.

A seconda delle normative applicabili, potrebbe essere necessario segnalare gli incidenti anche alle autorità nazionali. Per l'Unione Europea, gli incidenti gravi devono essere segnalati alle autorità competenti del Paese membro dell'Unione Europea dove si trova l'utente e/o il paziente.

2.11 ENTE NORMATIVO INCARICATO

La tabella riportata di seguito elenca le informazioni di contatto dell'ente normativo incaricato.

Ente normativo incaricato	Contatti
Sponsor australiano	Emergo Australia Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
Sponsor neozelandese	CARSL Consulting PO Box 480 Pukekohe Nuova Zelanda
Agente USA	RaySearch Americas, Inc. The Empire State Building 350 5th Avenue, Suite 5000 New York, New York 10118 USA









2.12 ETICHETTA DEL PRODOTTO

Il numero di versione del sistema RayCare 6A installato può essere consultato selezionando **About** (Informazioni su) nel menu RayCare.

Si possono identificare le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto = RayCare
- Versione della release = **6.0**
- Nome commerciale = RayCare 6A
- Numero di versione del software = **6.0.0.60553**
- Versione clinica = Indica che si tratta di un prodotto per uso clinico
- Nome dell'ambiente = Il nome dell'ambiente in cui vengono eseguiti i servizi RayCare
- Ciclo di vita del prodotto = La durata di mercato è di un anno dopo la successiva versione principale, ma non meno di tre anni
- Concesso in licenza a [Nome ospedale] fino al [Data]. Queste informazioni vengono aggiornate per ogni struttura ospedaliera e per ogni installazione.

- Sistema informativo oncologico = Il nome generico del prodotto

-  = Indica che il prodotto è un dispositivo medico
-  = numero di identificazione univoco del dispositivo
-  = Il rappresentante autorizzato e importatore svizzero
-  = Marchio CE e numero dell'organismo notificato
-  = Data di produzione
-  = Consultare le istruzioni per l'uso
-  = Nome e indirizzo del produttore
-  = Indirizzo e-mail dell'assistenza

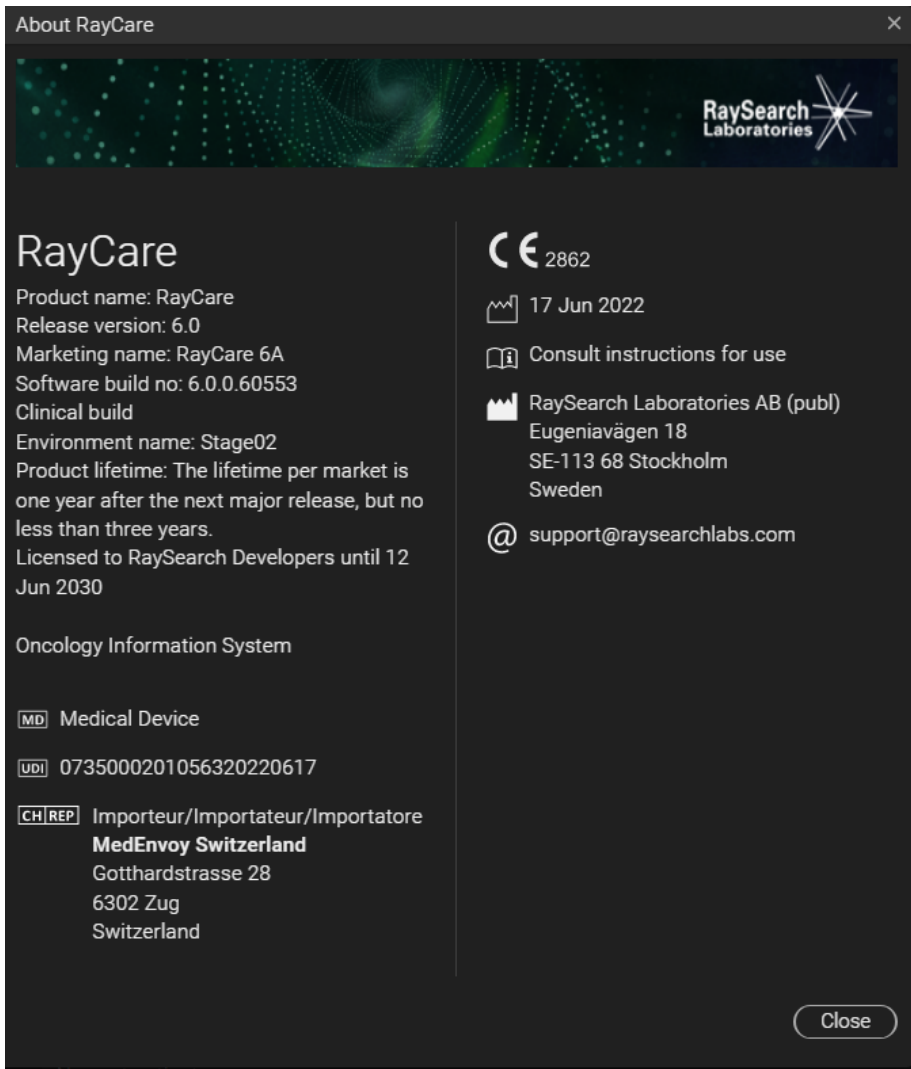


Figura 1. La finestra di dialogo di **About RayCare**.

2.13 CICLO DI VITA

La durata di mercato è di un anno dopo la successiva versione principale, ma non meno di tre anni. Il supporto per una versione del prodotto nel mercato termina 36 mesi dopo il suo rilascio, a condizione che una nuova versione principale venga rilasciata entro 24 mesi. In caso contrario, il supporto viene prolungato e termina 12 mesi dopo il rilascio della successiva versione principale nello stesso mercato. Quando una versione non è più supportata in un determinato mercato, si ritiene raggiunta la fine del ciclo di vita in tale mercato.

2.14 INFORMAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO

Numero SRN europeo

Il numero di registrazione unico (SRN) = SE-MF-000001908 è stato assegnato a RaySearch Laboratories AB (publ), come richiesto dal Regolamento UE MDR 2017/745.

3 INFORMAZIONI NECESSARIE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO

Questo capitolo contiene informazioni necessarie per un utilizzo sicuro del sistema RayCare 6A.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

3.1	Formato di visualizzazione	p. 18
3.2	Precauzioni di sicurezza	p. 18

3.1 FORMATO DI VISUALIZZAZIONE

In RayCare, la visualizzazione della data e dell'ora può essere configurata in due formati diversi:

- **Formato UE:** "ggMMMAAAA, HH:mm", ad esempio: "14 Gen 1975, 13:20".
- **Formato USA:** "ggMMMAAAA, h:mm a", ad esempio: "14 Gen 1975, 01:20 pm".

Questa configurazione viene stabilita a livello di sistema e si applica a tutti i client, indipendentemente dalle impostazioni locali di Windows.

3.2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Rispettare scrupolosamente le seguenti avvertenze e tenere presente i problemi noti per utilizzare il sistema RayCare 6A in modo sicuro.

Nota: *Tenere presente che note di rilascio aggiuntive relative alla sicurezza potrebbero essere distribuite separatamente entro un mese dall'installazione del software.*

In questa sezione

Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:

3.2.1	Avvertenze generali e problemi noti	p. 19
3.2.2	Avvertenze e problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente	p. 20
3.2.3	Avvisi e problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline	p. 24
3.2.4	Avvertenze e problemi noti relativi alla programmazione	p. 25
3.2.5	Avvisi e problemi noti relativi al flusso di lavoro	p. 27
3.2.6	Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation	p. 30
3.2.7	Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della gestione del trattamento con RayTreat e RayCommand	p. 32
3.2.8	Avvisi e problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini	p. 36
3.2.9	Avvisi e problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni	p. 40
3.2.10	Avvisi e problemi noti relativi agli script	p. 42
3.2.11	Avvertenze e problemi noti relativi all'amministrazione del sistema	p. 43
3.2.12	Avvisi e problemi noti relativi all'ambiente di sistema	p. 48
3.2.13	Avvertenze e problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati	p. 50

3.2.1 Avvertenze generali e problemi noti



AVVERTENZA!

Le modifiche non salvate possono andare perse. Se l'utente esce da uno spazio di lavoro, chiude una finestra di input o si sposta in un'altra riga di una tabella, le modifiche non salvate possono andare perse senza preavviso. {55572}



AVVERTENZA!

Visualizzatore di immagini. Il visualizzatore di immagini non è destinato all'uso diagnostico. {61637}



AVVERTENZA!

Upgrade del sistema. Se viene eseguito l'upgrade del sistema RayCare a una nuova versione, la struttura ospedaliera è responsabile della convalida del sistema prima che si prosegua con l'uso clinico. {97332}



AVVERTENZA!

Limitazione della vendita negli Stati Uniti. Le leggi statali e federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo prodotto a un medico o su ordine di un medico. {149255}



AVVERTENZA!

Record paziente danneggiato. Il danneggiamento del record del paziente si verifica quando RayCare rileva un errore o un'incoerenza nei dati di uno specifico paziente. Se RayCare non è in grado di effettuare un ripristino automatico dall'errore, i dati del paziente vengono contrassegnati come broken patient record (record paziente danneggiato). Quando ciò accade, nel pannello del paziente viene visualizzato un banner in cui è riportato il messaggio "The patient record is broken" (Il record del paziente è danneggiato). I dati del paziente visualizzati potrebbero non essere aggiornati e/o corretti. L'utente non dovrà effettuare alcuna operazione su questo paziente in RayCare fino a quando il problema non viene risolto. Per risolvere il problema, contattare l'assistenza RaySearch. {573275}



AVVERTENZA!

Sistema RayCare bloccato. Se viene rilevato un errore che il sistema RayCare non riesce a risolvere automaticamente, il sistema verrà impostato in uno stato di blocco. Quando ciò accade, in RayCare viene visualizzato un banner con il messaggio “An error has occurred and the system is blocked. Please contact the system administrator” [Si è verificato un errore e il sistema è bloccato. Contattare l'amministratore di sistema]. Quando si verifica questo evento, tutti gli utenti ad eccezione degli amministratori di sistema vengono disconnessi dal sistema. Gli amministratori di sistema possono accedere al sistema, ma devono essere consapevoli del fatto che il sistema non può essere utilizzato in sicurezza e che i dati visualizzati potrebbero non essere aggiornati e/o corretti. Per risolvere il problema, contattare l'assistenza RaySearch. {573274}

3.2.2 Avvertenze e problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente



AVVERTENZA!

Identificatori aggiuntivi del paziente. Quando modifica gli identificatori aggiuntivi del paziente, l'utente deve considerare se ci sono altri sistemi che identificano il paziente con tale ID e, in tal caso, deve aggiornare tutti i sistemi di conseguenza. {148497}



AVVERTENZA!

Verifica dell'intento del trattamento e delle istruzioni di configurazione dopo l'approvazione. Dopo aver firmato l'intento del trattamento o le istruzioni di configurazione, occorre convalidare la correttezza dei dati e dello stato visualizzati. {61397}



AVVERTENZA!

RayCare e RayStation devono essere configurati in modo da utilizzare la stessa dose. Controllare che RayCare e RayStation utilizzino la stessa unità per la visualizzazione della dose di radiazioni (cGy o Gy). {55838}

**AVVERTENZA!**

La modifica dei valori nei documenti RayCare non implica la modifica dei valori corrispondenti in RayCare. Se si modificano dei valori in un documento nello spazio di lavoro RayCare Document (Documento RayCare), i valori corrispondenti in RayCare non vengono modificati. [58837]

**AVVERTENZA!**

Verifica delle istruzioni di configurazione per controllare che corrispondano all'isocentro e al piano. Approvare sempre le istruzioni di configurazione, le foto di configurazione applicabili e l'immagine di pianificazione principale dopo aver verificato che siano corrette e corrispondano tra loro. Quando si crea un nuovo piano con un isocentro diverso da quello originariamente descritto nelle informazioni di configurazione, le istruzioni di configurazione devono essere aggiornate per evitare discrepanze tra il piano corrente e le istruzioni di configurazione. [58607]

**AVVERTENZA!**

Numero fisso di decimali per i valori memorizzati. Durante l'inserimento dei dati delle misurazioni numeriche, l'utente deve considerare che RayCare non limita il numero di decimali inseribili, ma memorizza i valori utilizzando solo il numero di decimali predefiniti per ogni tipo di misura. La temperatura corporea di un paziente, ad esempio, viene sempre memorizzata e visualizzata con un unico decimale. Verificare sempre i valori immessi dopo la memorizzazione. [122636]

**AVVERTENZA!**

Note e segnalazioni. Nella scheda Documentation Overview [Panoramica documentazione], si trovano tutte le note sul paziente, i commenti su attività e appuntamenti e i messaggi relativi al paziente RayCare. Le segnalazioni che riguardano spazi di lavoro o schede specifici non vengono visualizzate nella scheda Documentation Overview [Panoramica documentazione]. [227121]



AVVERTENZA!

Allergia a sostanze farmacologiche. Se l'indicazione dell'allergia viene inserita come testo libero, gli avvisi relativi alle allergie a sostanze farmacologiche potrebbero non essere visualizzati. L'avviso viene visualizzato solo se l'ortografia del termine inserito per l'allergia corrisponde esattamente a quella della sostanza. {227236}



AVVERTENZA!

Le prescrizioni del sito di trattamento RayCare non sono collegate alle prescrizioni del set di fasci RayStation. I valori di prescrizione immessi in RayCare non vengono propagati a RayStation. Non viene eseguita alcuna validazione tra i sistemi sui valori di prescrizione immessi. L'utente è tenuto a immettere manualmente in RayStation le prescrizioni del set di fasci corrispondenti alle prescrizioni del sito di trattamento RayCare. L'utente deve esaminare attentamente che le prescrizioni del set di fasci RayStation siano in linea con le prescrizioni del sito di trattamento RayCare. {570679, 570675}



AVVERTENZA!

Stato del caso RayCare. Lo stato del caso RayCare non influisce su RayCare, RayStation, RayTreat o RayCommand. È comunque possibile modificare i dati e continuare il trattamento. {574262}

**AVVERTENZA!**

Le istruzioni di installazione specificano il piano di cura per tutti gli elementi relativi alla sessione di trattamento. Il piano di cura associato alle sessioni di trattamento nel corso del trattamento del paziente è definito dalle istruzioni di configurazione approvate. Il piano di cura specificato per l'istruzione di configurazione approvata verrà associato a tutte le sessioni di trattamento in cui sono previsti set di fasci sull'immagine della programmazione selezionata nell'istruzione di configurazione. Tutti gli elementi relativi alle sessioni di trattamento saranno associati a quel piano di cura, inclusi appuntamenti per il trattamento, attività e revisioni delle immagini offline.

È possibile modificare il piano di cura per gli elementi relativi alla sessione di trattamento rimuovendo l'approvazione delle istruzioni di configurazione e creando una nuova istruzione di configurazione e specificando un altro piano di cura per tale istruzione di configurazione. {574264}

**AVVERTENZA!**

La dose viene visualizzata come RBE quando RBE e dose fisica vengono visualizzate insieme. Quando per un sito di trattamento viene visualizzata una dose, tutte le dosi vengono visualizzate come dosi RBE se una dose prescritta o somministrata per quel sito di trattamento presenta una ponderazione RBE. {574458}

**AVVERTENZA!**

Il valore selezionato nel documento bozza viene rimosso se è eliminato da RayCare. Se un oggetto di dominio RayCare è stato scelto nell'elenco a discesa in un documento e uno dei valori selezionati è stato rimosso dal record del paziente, il valore rimosso non verrà visualizzato nel documento. {686519}

Altri problemi noti relativi alla cartella clinica del paziente

- Quando si aggiornano i metadati di un documento, come il titolo o il flusso di lavoro associato, nello spazio di lavoro RayCare Document [Documento RayCare], le modifiche vengono applicate a tutte le versioni precedenti del documento. {59153}
- L'icona della corona indica che l'immagine è utilizzata per la pianificazione e non viene rimossa dalla serie di immagini nello spazio di lavoro Images [Immagini] all'interno della cartella clinica

e nello spazio di lavoro PACS quando le relative istruzioni di pianificazione sono impostate su Entered in error (Errore inserito). {686261}

- La disapprovazione di un documento di ordine non provoca l'annullamento dell'ordine stesso. Per evitare che l'ordine venga eseguito, annullare manualmente l'ordine dallo spazio di lavoro Order (Ordine). {687393}
- I documenti vengono definiti "moduli" in molti spazi di lavoro e finestre di dialogo RayCare. {688070}
- Se si utilizza un oggetto di dominio esteso definito come campo di testo multilinea con formattazione RTF in un documento, e quindi si riutilizza lo stesso oggetto di dominio esteso in un altro documento con visualizzazione a riga singola, verranno visualizzati i caratteri di markdown. Evitare di utilizzare lo stesso oggetto di dominio esteso di questo tipo con opzioni di visualizzazione diverse. {1014635}
- Quando si visualizza un documento RayCare nella cartella del paziente, la notifica "Updated since last save" (Aggiornato dall'ultimo salvataggio), che indica che un valore è cambiato in un documento, viene visualizzata per il paragrafo e non per gli oggetti di dominio RayCare particolari specificati nel paragrafo. Assicurarsi di verificare tutti i valori nel paragrafo. {1067917}
- Quando si aprono versioni precedenti dei documenti caricati nello spazio di lavoro documenti, le informazioni sui metadati nell'intestazione del documento mostrano i dati relativi alla versione corrente. {1069400}

3.2.3 Avvisi e problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline



AVVERTENZA!

Immagini di trattamento importate manualmente per la revisione delle immagini offline. L'importazione manuale di immagini di trattamento e delle relative registrazioni sarà disponibile nello spazio di lavoro di revisione delle immagini offline per tutti i casi del paziente. L'utente ha la responsabilità di collegare manualmente le immagini di trattamento al caso RayCare corretto. {573886}



AVVERTENZA!

Le immagini principali e secondarie della visualizzazione 2D/3D sono diverse rispetto a quelle della visualizzazione 3D/3D. Quando si esegue l'esame offline delle immagini con fusione 2D/3D, l'utente deve essere a conoscenza del fatto che le immagini principali e secondarie vengono invertite rispetto alla fusione 3D/3D. Nella visualizzazione 2D/3D, l'immagine RT viene utilizzata come immagine principale e la TAC di pianificazione come immagine secondaria. {227770}

**AVVERTENZA!**

Fusione 2D/3D. La revisione delle immagini offline per la fusione 2D/3D è supportata e convalidata solo per le immagini RT provenienti da un sistema di imaging prodotto da MedPhoton. [226036]

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi alla revisione dell'immagine offline

- Un piano di trattamento utilizzato per una frazione non viene contrassegnato con chiarezza quando si esegue la revisione dell'immagine offline. Tutti i piani di trattamento approvati sono riportati nell'elenco a discesa del piano RT o del piano RT con ioni del Image viewer. L'utente deve selezionare attivamente il piano di trattamento corretto dall'elenco a discesa. [72681]

Altri problemi noti relativi alla revisione dell'immagine offline

- I commenti registrati durante la revisione delle immagini offline non vengono visualizzati in RayTreat fino a quando non è stato impostato uno stato nel risultato della revisione delle immagini offline. [573181]

3.2.4 Avvertenze e problemi noti relativi alla programmazione

**AVVERTENZA!**

Se si modificano gli appuntamenti manualmente, le regole della programmazione degli appuntamenti per il trattamento non vengono sempre applicate. Quando si prenota un appuntamento manualmente o si modifica una fascia oraria suggerita per un appuntamento per il trattamento, è possibile che le regole temporali specificate per il tipo di appuntamento vengano violate. [55702]

**AVVERTENZA!**

Le regole dei suggerimenti per il template degli appuntamenti non vengono applicate quando si riprogrammano parti di serie. Le regole dei suggerimenti per il template degli appuntamenti vengono applicate solo quando si utilizza la funzionalità di programmazione o riprogrammazione. I suggerimenti forniscono dei suggerimenti di programmazione per la serie completa di appuntamenti solo prima che siano state apportate modifiche. Quando si modificano manualmente gli appuntamenti, le regole non vengono verificate. Se uno o più appuntamenti vengono modificati manualmente, le regole dei suggerimenti non verranno applicate. [572967]

**AVVERTENZA!**

Frequenza degli appuntamenti per il trattamento. È responsabilità dell'utente programmare gli appuntamenti per il trattamento con gli intervalli appropriati. Se per uno stesso paziente vengono programmati più trattamenti in un breve intervallo di tempo, non viene visualizzato alcun avviso. {573563}

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi alla programmazione

- Quando si riprogramma un appuntamento per il trattamento con informazioni sul piano di trattamento e sul set di fasci impostati su un'altra macchina per il trattamento, le informazioni sul piano di trattamento e sul set di fasci non vengono aggiornate fino al salvataggio. {474409}

Altri problemi noti relativi alla programmazione

- Non è possibile riprogrammare gli appuntamenti aggiunti manualmente. La funzione di riprogrammazione è disponibile solo per gli appuntamenti prenotati sulla base delle attività. {98221}
- Non è possibile riprogrammare le serie di appuntamenti parzialmente prenotate. Per riprogrammare una serie di appuntamenti utilizzando la funzione "Reschedule" (Riprogramma) nello spazio di lavoro Calendar (Calendario), tutti gli appuntamenti della serie devono prima essere prenotati. {149254}
- Quando si programmano gli appuntamenti, il nome della struttura ospedaliera di appartenenza del paziente non viene visualizzato nell'interfaccia utente. {472174}
- Quando si programmano e si riprogrammano gli appuntamenti per il trattamento tramite lo spazio di lavoro Scheduling (Programmazione), le informazioni del piano di cura vengono visualizzate solo quando le sessioni di trattamento sono state collegate a RayTreat e hanno istruzioni di configurazione approvate. {472575}
- Quando un amministratore di sistema annulla un appuntamento da una serie di appuntamenti, senza annullare l'intera serie, e successivamente fa clic su Cancel (Annulla) nella finestra di dialogo di conferma, il singolo appuntamento viene comunque annullato invece di permanere. {568887}
- Non è possibile ottenere suggerimenti di programmazione per una risorsa in cui non è specificata alcuna struttura ospedaliera. {571975}
- Gli appuntamenti per il trattamento annullati in RayCare vengono comunque visualizzati in RayTreat e RayCommand. {574131}
- Se gli appuntamenti di una serie di appuntamenti sono stati modificati manualmente in modo da non soddisfare le regole dei suggerimenti per il template degli appuntamenti, anche se gli appuntamenti per il trattamento non sono in ordine sequenziale, non vengono forniti

suggerimenti di programmazione. L'utente deve pianificare manualmente gli appuntamenti dallo spazio di lavoro del calendario Trattamento. {1067727}

- In alcune situazioni, la data target per gli appuntamenti prenotati in un modulo precedente può essere impostata sulla data pianificata dell'appuntamento. {1068701}
- Quando un appuntamento di consulenza viene collegato per la prima volta alla data target per la consulenza del piano di assistenza nelle proprietà del flusso di lavoro Edit (Modifica), e successivamente ricollegato alla data target della consulenza del caso, non verrà visualizzata alcuna data target sull'appuntamento collegato. Evitare di ricollegare un appuntamento dalla data target della consulenza del piano di assistenza alla data target della consulenza del caso. {904132}

3.2.5 Avvisi e problemi noti relativi al flusso di lavoro



AVVERTENZA!

Modifiche manuali degli stati delle attività. RayCare supporta attività che possono essere aggiornate tramite interazione manuale con l'attività o aggiornamenti automatici in base alla disponibilità di informazioni nel sistema. Non viene eseguita alcuna verifica per controllare che l'interazione manuale sia coerente con la disponibilità di informazioni. Pertanto, quando si aggiorna manualmente lo stato dell'attività, verificare che lo stato sia coerente con lo stato effettivo di tutte le informazioni correlate. {16084}



AVVERTENZA!

Le date di scadenza per le attività possono avere dipendenze. RayCare supporta la gestione delle date di scadenza per le attività che vengono spesso definite in relazione ad altre attività. Pertanto, la modifica di una data di scadenza di un'attività può comportare una modifica delle date di scadenza di altre attività. Per flussi di lavoro specifici, l'utente deve assicurarsi di controllare in che modo le date di scadenza sono correlate. {16099}

**AVVERTENZA!**

Annullamento e ripetizione delle attività. Per garantire flessibilità e consentire all'utente di correggere eventuali errori, il completamento di un'attività può essere annullato. La maggior parte delle attività sono rappresentazioni di fasi cliniche eseguite per ottenere il completamento dell'attività. È importante ricordare che tali fasi non vengono automaticamente ripristinate modificando lo stato di un'attività, quindi può essere necessario prevedere delle fasi compensative aggiuntive. [16104]

**AVVERTENZA!**

Verifica dello stato dell'appuntamento per il trattamento prima dell'annullamento di un modulo di flusso di lavoro di trattamento o di un caso RayCare. Prima di annullare un flusso di lavoro di trattamento o di chiudere un caso RayCare, verificare sempre che in RayCare non siano presenti appuntamenti per il trattamento non rispettati. Verificare inoltre lo stato del ciclo di trattamento in RayTreat. [14655]

Altri problemi noti relativi al flusso di lavoro

- Nell'elenco delle attività della cartella clinica del paziente non viene visualizzata un'icona per indicare che un modulo del flusso di lavoro o un ordine contiene commenti. L'icona viene visualizzata solo nei commenti sulle attività e sugli appuntamenti. [367581]
- Se si apre la finestra di dialogo Edit task [Modifica attività] senza salvare le modifiche, l'attività non viene aggiunta all'elenco delle attività Recent [Recenti] nello spazio di lavoro Home. [368675]
- Le attività di risoluzione dei problemi non collegate ad alcun caso non vengono visualizzate nell'elenco delle attività della cartella clinica dei pazienti. Un amministratore di sistema può accedere a questa attività tramite l'elenco di attività del pannello sinistro della cartella clinica del paziente. [572510]
- Non vi è alcuna indicazione che per un'attività secondaria sia stato configurata una checklist. Per visualizzare la checklist dell'attività secondaria, aprire la finestra di dialogo Edit task (Modifica attività) relativa all'attività secondaria. [569515]
- I commenti fatti quando si esegue un'attività appartenente a un ciclo di revisione, come ad esempio la creazione e la revisione del piano di trattamento, non vengono visualizzati nelle attività successive dello stesso ciclo di revisione, se le attività sono separate. Ad esempio, l'utente dovrà visualizzare i commenti nell'attività Create dose plan (Crea piano dosi) quando lavora con l'attività Review dose plan (Rivedi piano dosi). [573287]
- Un modulo di flusso di lavoro di erogazione del trattamento per un caso non può essere annullato o sostituito dopo che un piano di trattamento è stato impostato per l'uso nel trattamento di

quel caso. Se l'intento è quello di annullare definitivamente il trattamento, l'utente può invece annullare tutte le attività e gli appuntamenti nel modulo di flusso di lavoro e quindi impostare lo stato del modulo su Completed (Completo). Invece di creare un nuovo modulo di erogazione del trattamento per il caso, valutare se è il caso di adattare il modulo esistente inserendo attività e modificando i template di appuntamento in base alle esigenze. {573374}

- Un'attività nello stato Pending (In attesa) con sotto-attività e/o elementi dell'elenco collegati non viene aggiornata allo stato Started (Iniziato) quando viene eseguita un'azione per la sotto-attività e/o gli elementi dell'elenco. Lo stato dovrebbe essere aggiornato manualmente da Started (Iniziato) a Pending (In attesa). {687124}
- Nella finestra di dialogo Edit workflow properties (Modifica proprietà del flusso di lavoro), verranno create date target distinte per il piano e il set di fasci per ciascun modulo piano e set di fasci, anche se il piano usato in entrambi i moduli del flusso di lavoro è lo stesso. L'utente deve accertarsi di aver impostato tutte le date target. Cancellando il modulo piano o set di fasci non viene eliminata la data target per il piano o il set di fasci. {688148, 688161, 688470}
- Le date di scadenza delle attività collegate a una data target nella finestra di dialogo Edit workflow properties (Modifica proprietà del flusso di lavoro) non vengono ricalcolate in base alla data target se l'appuntamento collegato viene annullato o viene segnalato un errore. {688177}
- Quando l'attività presenta dei commenti collegati, non viene visualizzata l'icona dei commenti sulle schede attività nella finestra di dialogo Edit order (Modifica ordine) o Edit module (Modifica modulo). Rivedere i commenti nella scheda Comments (Commenti) o All comments (Tutti i commenti), o nelle rispettive attività. {688133}
- Non è possibile aggiungere un secondo modulo di flusso di lavoro per un dato tipo di modulo, anche se il modulo esistente di quel tipo è stato completato. {687986}
- Quando viene aggiunto un modulo di erogazione del trattamento, non è possibile aggiungere un modulo flusso di lavoro che contenga attività di programmazione del trattamento. I moduli con attività di programmazione del trattamento devono essere aggiunti prima del modulo di erogazione del trattamento. {688501}
- La data target dell'appuntamento non viene visualizzata sull'appuntamento quando viene modificata dal punto fisso della data di scadenza del piano di assistenza al punto fisso della data di scadenza del caso nella gestione del flusso di lavoro. Aggiornare la data target nella finestra di dialogo delle proprietà del flusso di lavoro per evitare la data target mancante. {904132}
- Quando un'attività di moduli inseribili a livello di piano di assistenza viene inserita in un'attività su caso, il modulo viene creato a livello di caso e non sarà possibile compilarlo. Evitare di inserire manualmente un'attività documentale a livello di piano di assistenza in un modulo a livello di caso o di paziente o in attività documentali a livello di caso in un modulo a livello di paziente. {1068216}
- Le icone del piano e del set di fasci non vengono visualizzate nell'elenco delle attività in RayStation per le attività per cui non è necessario specificare un piano o un set di fasci prima di essere completate. {1069108}

- Non è possibile rimuovere le opzioni di configurazione delle attività quando si include un'attività in un modulo; è possibile solo aggiungere opzioni ulteriori a livello di modulo. {1069383}

3.2.6 Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation



AVVERTENZA!

Gli avvisi DICOM di RayStation devono essere esaminati. Verificare sempre se sono presenti avvisi di importazione DICOM dopo l'importazione automatica di un'immagine su RayStation. Gli avvisi possono essere esaminati nel registro di importazione DICOM di RayStation o nell'attività di risoluzione dei problemi che verrà generata su RayCare. {14590}



AVVERTENZA!

Interruzione della comunicazione tra RayStation e RayCare. In rare occasioni, la comunicazione tra RayCare e RayStation si interrompe, non consentendo ulteriori comunicazioni tra i sistemi per un paziente specifico. Se ciò dovesse accadere, contattare l'assistenza RaySearch per risolvere il problema. {14846}



AVVERTENZA!

RayStation non memorizza le informazioni di ottimizzazione in DICOM. Quando un piano di trattamento viene approvato in RayStation e memorizzato in RayCare PACS, alcune informazioni dettagliate relative al processo di ottimizzazione in RayStation non vengono trasferite. Per assicurarsi che tali informazioni vengano conservate, non eliminare il piano in RayStation dopo l'esportazione. {15060}



AVVERTENZA!

L'eliminazione dell'approvazione delle registrazioni di immagini in RayStation non si rifletterà in RayCare. Verificare sempre lo stato di approvazione delle registrazioni di immagini in RayStation. Le attività di pianificazione del trattamento nei flussi di lavoro RayCare non rifletteranno l'eliminazione dell'approvazione di questi elementi. {15088}

**AVVERTENZA!**

L'eliminazione dell'approvazione e la ripianificazione non devono essere avviate da RayCare. Lo stato delle attività di pianificazione del trattamento in RayCare non influisce sullo stato di approvazione dei set di strutture e dei piani in RayStation. Non tentare mai di annullare l'approvazione di set di strutture o piani modificando lo stato di un'attività di pianificazione del trattamento in RayCare. [16749]

**AVVERTENZA!**

Commenti RayStation. I commenti creati in RayStation verranno trasferiti a RayCare solo se collegati a un'attività RayStation, se aggiunti dall'elenco di attività RayCare a RayStation, se aggiunti tramite la sezione Ready for review (Pronti per la revisione), se aggiunti dalla finestra di dialogo di approvazione del piano o del set di fasci oppure se aggiunti al campo dei commenti del set di fasci nella finestra di dialogo del piano New/Edit (Nuovo/Modifica). [573283]

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation

- I dettagli del piano di trattamento e del set di fasci di RayStation non possono essere visualizzati correttamente dopo aver rimosso il piano di trattamento, il caso o il paziente da RayStation. Inoltre, se il paziente viene ripristinato utilizzando un file di backup RayStation, le informazioni non verranno aggiornate in RayCare. [474559]

Altri problemi noti relativi all'integrazione della pianificazione del trattamento con RayStation

- L'immagine di programmazione principale in RayCare non è preselezionata in RayStation quando si apre un caso in RayStation. [472819]
- I nomi delle immagini DICOM non vengono utilizzati in modo coerente in RayCare e RayStation. Nella visualizzazione Treatment (Trattamento) viene utilizzata la convenzione di denominazione utilizzata in RayStation. [472754]
- La funzione "Make available for planning" (Rendi disponibile per la programmazione) nello spazio di lavoro Images (Immagini) nella cartella clinica del paziente non sempre funziona per i piani di trattamento (RTPLAN) e per i set di strutture (RTSTRUCT). In questi casi l'utente dovrà importare manualmente DICOM RTPLAN o RTSTRUCT in RayStation. [567891]
- Un modulo flusso di lavoro per uno specifico piano di cura può essere collegato a un piano di trattamento e a un set di fasci che appartengono a un diverso piano di cura. La selezione delle

immagini di pianificazione per le istruzioni di configurazione del piano di cura può essere incompatibile con il piano e il set di fasci collegati in un modulo flusso di lavoro. {687323}

- La data e l'ora di approvazione di un set di fasci RayStation visualizzati nella descrizione del comando di stato nello spazio di lavoro panoramico del piano possono differire dall'ora di approvazione del set di fasci in RayStation. Assicurarsi di verificare l'ora di approvazione in Gestione dei dati del paziente RayStation. {903675}
- Lo stato del piano di un piano di simulazione virtuale sarà visualizzato come Created (Creato) nello spazio di lavoro panoramico del piano anche dopo che il piano è stato approvato. Disapprovando il piano di simulazione virtuale si modifica lo stato in Unapproved (Non approvato). Assicurarsi di verificare lo stato di un piano di simulazione virtuale in RayStation. {904023}
- Il pannello del paziente in RayStation non fornisce alcuna indicazione se il paziente RayCare corrispondente è stato rimosso. {1014845, 1067695}
- I commenti aggiunti dopo l'impostazione di un piano nello stato di predisposizione alla revisione o l'approvazione del piano in RayStation non verranno aggiunti all'attività correlata a meno che non venga modificato anche lo stato dell'attività. I commenti sono disponibili nella panoramica del piano. {749502, 1069225}
- Il nome o cognome del paziente trattato con un dispositivo terapeutico Accuray è limitato a 30 caratteri. Non sarà possibile approvare il piano di trattamento in RayStation. Assicurarsi che il nome o il cognome siano più corti di 30 caratteri. {685046}
- Se un set di fasci viene assegnato al trattamento in RayStation e la nota del set di fasci per il set di fasci stesso viene modificata, la nota rimarrà nel trattamento anche se l'utente annulla l'assegnazione del set di fasci dal trattamento, modifica il commento sul set di fasci in Progettazione dei piani in RayStation e riassegna il set di fasci al trattamento. Il commento aggiornato sul set di fasci verrà visualizzato correttamente in RayCare come osservazione di pianificazione nella panoramica del piano e nella lavagna Trattamento. {1068827}

3.2.7 Avvertenze e problemi noti relativi all'integrazione della gestione del trattamento con RayTreat e RayCommand



AVVERTENZA!

La modifica degli appuntamenti per il trattamento in RayCare non modifica il ciclo di trattamento in RayTreat. Il numero di frazioni presenti nel ciclo di trattamento viene gestito in RayStation e RayTreat e non può essere aggiornato o modificato dall'interfaccia utente di RayCare. La rimozione di appuntamenti per il trattamento in RayCare può essere accidentalmente interpretata in modi che influenzano il ciclo di trattamento. Pertanto, occorre eseguire regolarmente degli aggiornamenti del ciclo di trattamento e verificare lo stato del ciclo di trattamento in RayStation e RayTreat. {14395}

**AVVERTENZA!**

Si consiglia di descrivere tutte le istruzioni di configurazione collegate alla stessa immagine di programmazione nella stessa istruzione di configurazione. {74052}

**AVVERTENZA!**

Dati RayStation o RayTreat. I dati relativi ai piani di trattamento e all'erogazione del trattamento visualizzati in RayCare provengono dai sistemi RayStation e RayTreat. Assicurarsi di controllare sempre i dati nel sistema originale. {228134}

**AVVERTENZA!**

I record del trattamento importati nel PACS RayCarenon vengono automaticamente trasferiti su RayTreat. L'utente deve sempre importare i record del trattamento pertinenti su RayStation. {369254}

**AVVERTENZA!**

Avanzamento nominale della dose. È possibile tenere traccia dell'avanzamento nominale della dose verso una o più prescrizioni durante l'erogazione del trattamento eseguita utilizzando RayTreat o RayCommand.

RayCare presenta l'avanzamento nominale della dose per sito di trattamento e il tipo di prescrizione per un caso selezionato. Le prescrizioni RayCare e RayStation vengono visualizzate come un unico elemento quando hanno nomi di siti di trattamento e tipi di prescrizione identici.

L'avanzamento nominale della dose non è correlato alla dose calcolata in RayStation. Si basa esclusivamente sulla prescrizione del set di fasci in RayStation e non dipende dal fatto che la prescrizione del set di fasci venga soddisfatta o meno. {574154}

**AVVERTENZA!**

Ordine degli appuntamenti e delle sessioni di trattamento. Per ogni trattamento è prevista una numerazione continua delle sessioni all'interno del caso del paziente. L'uso di diversi piani di cura, prescrizioni o siti di trattamento non influisce sulla numerazione. Per conoscere l'ordine di appuntamenti e sessioni di trattamento nel caso in cui al trattamento siano stati assegnati diversi piani e/o set di fasci, controllare il trattamento e l'elenco degli appuntamenti. Valutare se sia opportuno utilizzare una denominazione informativa del piano e del set di fasci. {574218}

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi all'integrazione della gestione del trattamento con RayTreat e RayCommand

- Lo stato del frazionamento e della sessione del trattamento in RayCare non è sempre coerente con lo stato corrispondente nel corso del trattamento RayStation quando le sessioni di trattamento vengono *prima annullate e successivamente* registrate manualmente in RayStation/RayTreat/RayCommand. Di conseguenza, potrebbero essere visualizzati diversi avanzamenti del trattamento negli spazi di lavoro RayCare (pannello del paziente, panoramica e riepilogo del corso del trattamento, panoramica del piano e pannello del trattamento). {683942, 683943, 686712, 681899, 684735, 687196}
- Le correzioni online del lettino sono impostate a 0 per tutte le correzioni nello spazio di lavoro Treatment course overview (Panoramica del corso del trattamento) quando il trattamento viene erogato con un dispositivo di trattamento Varian TrueBeam. {685099}
- RayCommand non presenta uno spazio di lavoro per la revisione dell'immagine dove visualizzare le informazioni relative alla revisione dell'immagine offline. Di conseguenza, lo stato e gli eventuali commenti sulla revisione dell'immagine offline da RayCare non saranno visibili dall'utente in RayCommand. L'utente dovrà controllare lo stato della revisione dell'immagine offline di una frazione precedente in RayCare, prima di consegnare la frazione successiva in RayCommand. {683912}

Altri problemi noti relativi all'integrazione della gestione del trattamento con RayTreat e RayCommand

- I modelli di frazionamento non vengono sincronizzati tra RayCare e RayStation {150035}:
 - RayStation non utilizza i modelli di frazionamento programmati, né il numero di frazioni di RayCare.
 - Quando si utilizza un piano RayStation per il trattamento in RayTreat, il modello di frazionamento programmato in RayStation non viene validato in base alle frazioni programmate in RayCare. Il numero di frazioni programmate in un piano di trattamento RayStation sarà programmato per il trattamento, con una richiesta automatica di

aggiornamenti alla programmazione in RayCare, qualora sia necessario un numero maggiore di appuntamenti.

- La valutazione e l'ottimizzazione radiobiologica saranno valutate solo per il modello di frazionamento pianificato in RayStation, indipendentemente dalle sessioni di trattamento programmate in RayCare.
- L'arrotondamento dei valori nella visualizzazione del trattamento di RayCare potrebbe in alcuni casi differire dall'arrotondamento visualizzato in RayTreat. (567401)
- Quando si riduce il numero di appuntamenti per il trattamento dalla gestione del flusso di lavoro dopo l'interruzione di un trattamento, gli appuntamenti relativi al trattamento sono ancora visibili nel calendario in RayTreat. (568386)
- Non è possibile annullare una sessione di trattamento in RayStation fino a quando non viene programmato un dispositivo di trattamento sul relativo appuntamento per il trattamento in RayCare. (628866)
- Le osservazioni sulla pianificazione e sul trattamento del set di fasci mostrate nella panoramica del piano RayCare sono chiamate diversamente in RayStation e in RayCommand. Nella finestra di dialogo per la modifica del piano RayStation, le osservazioni sulla pianificazione del set di fasci vengono definite Comment (Commento) sul rispettivo set di fasci. Invece in RayStation e RayCommand, le osservazioni sul trattamento del set di fasci vengono chiamate Beam set note (Nota sul set di fasci) o Treatment note (Nota sul trattamento). (683913)
- Le osservazioni sulla pianificazione del set di fasci e le osservazioni sul trattamento del set di fasci mostrate nella panoramica del piano RayCare, non sono visualizzate in RayTreat. (684848)
- Nell'appuntamento sulla programmazione RayTreat/RayCommand non viene visualizzata l'icona dei commenti se l'appuntamento in RayCare presenta dei commenti. I commenti sono visualizzati nella sezione dei commenti relativi all'appuntamento in RayTreat/RayCommand. (685205)
- Le informazioni relative all'utente firmatario della nota finale sul trattamento non sono disponibili nello spazio di lavoro Treatment course overview (Panoramica del corso del trattamento) quando il trattamento viene erogato con un dispositivo di trattamento Varian TrueBeam. (686776)
- L'avanzamento nominale in RayCare non registra alcuna dose somministrata a pazienti il cui corso del trattamento è creato in RayCare 4B o prima. Di conseguenza, la dose totale prevista non è perfettamente esatta. La dose totale prevista è la somma della dose somministrata e la dose residua, quindi la dose totale successivamente prevista per questi pazienti sarà sempre uguale alla dose residua. (684602)
- Quando viene programmato un appuntamento per un trattamento su un dispositivo di trattamento incompatibile e viene eseguita una registrazione manuale per questa sessione, il dispositivo di trattamento programmato viene visualizzato nello spazio di lavoro panoramico del trattamento al posto del dispositivo erogato. (903496)
- Il sistema di conteggio pianificato visualizzato nei risultati di erogazione del fascio nello spazio di lavoro Treatment course overview per una sessione interrotta, in cui l'erogazione potrebbe

continuare nella stessa sessione, potrebbe essere errata. Verificare il sistema di conteggio pianificato aprendo la sessione in RayCommand o nel software del fornitore terzo. Assicurarsi di verificare le note sulla release RayCommand. {904024}

- Se i dettagli del paziente vengono aggiornati in RayCare tra il check-in della prima sessione di una frazione e il check-in di una sessione di continuazione della stessa frazione, non sarà possibile avviare l'erogazione della sessione di continuazione. L'utente è tenuto ad annullare il check-in per la sessione di continuazione e a ripristinare le modifiche dei dettagli del paziente in RayCare. {1013271}
- Quando viene programmato un appuntamento per un trattamento su un dispositivo di trattamento incompatibile e viene eseguita una registrazione manuale per questa sessione, il dispositivo di trattamento programmato viene visualizzato nello spazio di lavoro panoramico del trattamento al posto del dispositivo erogato. {903496}
- Le immagini dei dispositivi di immobilizzazione nelle istruzioni di configurazione non verranno visualizzate in RayTreat o RayCommand. {1067738}
- L'avviso di approvazione delle istruzioni di configurazione sulla lavagna di trattamento può, in alcune circostanze, essere visualizzato anche se l'istruzione di configurazione è approvata. L'avviso viene sempre visualizzato se le istruzioni di configurazione non vengono approvate. L'utente può annullare l'approvazione e riapprovare le istruzioni di configurazione per rimuovere l'avviso. {1069513}

3.2.8 Avvisi e problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini



AVVERTENZA!

Completezza dell'importazione DICOM. RayCare PACS supporta l'importazione di oggetti DICOM da file provenienti da una directory specificata. Con questa funzione non è possibile convalidare che tutti i file destinati all'importazione sono realmente presenti nella directory specificata. Pertanto, prima di eseguire l'importazione, assicurarsi sempre che tutti i file siano presenti nella directory specificata e, al termine dell'importazione, verificare che gli oggetti DICOM siano stati importati correttamente. {13052}

**AVVERTENZA!**

Verifica del completamento della memorizzazione prima dell'eliminazione. Dopo l'acquisizione delle immagini in una particolare modalità, gli oggetti DICOM risultanti possono venir memorizzati in RayCare PACS. RayCare PACS può essere impostato in modo da inoltrare le immagini a un altro PACS tramite una regola di inoltro automatico. Per ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati delle immagini nella modalità in questione, verificare che le immagini siano state memorizzate correttamente in RayCare PACS e che le entità inoltrate abbiano archiviato correttamente le immagini prima di eliminarle dalla modalità. {13055}

**AVVERTENZA!**

Convalida del completamento dell'esportazione DICOM. RayCare PACS può essere utilizzato per esportare le serie DICOM in file DICOM memorizzati in una directory specificata dall'utente. L'esportazione creerà un file per ogni istanza DICOM della serie. Per assicurarsi che tutti i file siano stati archiviati correttamente, verificare che il numero di file nella directory corrisponda al numero di immagini della serie al termine dell'esportazione. {13057}

**AVVERTENZA!**

Aggiornamenti delle informazioni dei pazienti in RayCare PACS. RayCare PACS dispone di una funzione incorporata che consente all'utente di aggiornare le informazioni dei pazienti in modo che corrispondano alle informazioni contenute in RayCare. L'utente deve confermare manualmente gli aggiornamenti per ogni serie. Se un utente aggiorna accidentalmente solo le informazioni dei pazienti in un sottoinsieme della serie di uno studio, RayCare lo considererà uno studio DICOM con informazioni multiple del paziente e rifiuterà di eseguire alcune operazioni su tale serie. Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi di aggiornare tutte le serie di uno studio. {10828}



AVVERTENZA!

È necessario associare le immagini di pianificazione. Per garantire che le informazioni dei pazienti siano coerenti con il DICOM, RayCare offre una funzione per associare le serie DICOM a RayCare e correggere gli errori nelle informazioni DICOM. Tenere sempre presente che solo le serie di immagini associate possono essere utilizzate come immagini di pianificazione in RayCare. {16331}



AVVERTENZA!

Convalida del completamento dell'importazione dei dati non DICOM. RayCare PACS può importare dati non DICOM come file PDF, immagini JPEG e file ZIP. Una volta completata l'importazione, assicurarsi di confermare che i dati non DICOM importati appartengano al paziente selezionato. {52135}



AVVERTENZA!

Convalida degli script PACS. RayCare offre una funzione per sviluppare script PACS in grado di modificare i dati DICOM. Ogni struttura ospedaliera ha poi la responsabilità di convalidare tutti gli script PACS e di verificarne il corretto utilizzo. {52959}



AVVERTENZA!

Convalida degli aggiornamenti dei dati DICOM eseguiti dagli script PACS. Quando i dati DICOM vengono importati o esportati da RayCare PACS, gli script PACS sviluppati dalla struttura ospedaliera possono essere utilizzati per modificare i dati DICOM. La struttura ospedaliera è tenuta a garantire che gli aggiornamenti o il filtro dei dati DICOM eseguiti dallo script PACS siano quelli previsti. {52954}

**AVVERTENZA!**

Convalida del numero di immagini importate. RayCare PACS supporta la richiesta C-Get per il recupero delle immagini da PACS. Quando le immagini vengono recuperate utilizzando il metodo C-Get, non ci sarà alcun controllo che le immagini vengano memorizzate correttamente. Per assicurarsi che tutte le immagini siano state memorizzate correttamente, verificare che il numero di immagini corrisponda al numero di immagini della serie in RayCare PACS. {17730}

**AVVERTENZA!**

Gli script PACS richiedono un aggiornamento dopo l'aggiornamento. L'interfaccia DICOM utilizzata nello scripting per l'accesso ai dati DICOM è stata aggiornata rispetto alle versioni precedenti di RayCare. Per questo motivo, potrebbe essere necessario aggiornare il codice dello script. Dopo l'aggiornamento, lo script deve essere importato e attivato nuovamente. {149921, 55295}

**AVVERTENZA!**

Ripristino dei dati da un archivio esterno. I dati DICOM archiviati non possono essere ripristinati su RayCare se i dati nell'archivio vengono rimossi o se gli identificatori dei pazienti non corrispondono più. Se gli identificatori dei pazienti vengono modificati, per poter ripristinare i dati l'aggiornamento deve essere eseguito sia a livello di archivio che su RayCare. {368836}

Altri problemi noti relativi a RayCare PACS e Visualizzatore immagini

- Le informazioni registrate durante l'esecuzione di script PACS non vengono archiviate su disco. {567902}
- Non è possibile utilizzare lo strumento di test degli script PACS per la validazione degli script PACS. L'utente deve invece convalidare gli script in un ambiente RayCare non clinico. {567542}

3.2.9 Avvisi e problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni



AVVERTENZA!

Dati del paziente RayCare aggiornati tramite un sistema esterno. Se RayCare è configurato per ricevere i dati dei pazienti (ad esempio dati demografici, allergie o assicurazioni dei pazienti) tramite HL7 da un sistema esterno, tenere presente che sarà possibile aggiornare tali dati solo tramite il sistema esterno. Un utente amministratore è in grado di sostituire e modificare i dati, ma qualsiasi modifica apportata a tali dati su RayCare potrebbe poi essere sovrascritta se i dati del paziente venissero modificati in un secondo momento nel sistema di invio. {16055}



AVVERTENZA!

Aggiornamento dei dettagli del paziente in un sistema esterno da parte di RayCare. Se RayCare viene configurato in modo da inviare i dettagli del paziente tramite HL7 a un sistema esterno, occorre ricordare che qualsiasi modifica apportata manualmente ai dettagli del paziente in un sistema esterno potrebbe essere sovrascritta se i dettagli del paziente venissero modificati su RayCare. In questo tipo di integrazione RayCare deve essere considerato l'elemento master per le informazioni del paziente. Inoltre, RayCare non dovrebbe essere configurato per l'invio dei dati del paziente tramite HL7 se è già configurato per ricevere i dati, poiché l'integrazione bidirezionale non è supportata. La struttura ospedaliera è responsabile dell'aggiornamento corretto dei dati del paziente. {58745}



AVVERTENZA!

Alias paziente. A seconda della configurazione, l'utilizzo di un alias del paziente insieme a un'interfaccia ADT in uscita potrebbe causare la sovrascrittura del nome reale del paziente nel sistema ricevente. {369463}



AVVERTENZA!

Caso e piano di cura. Le informazioni sul caso e sul piano di cura RayCare non vengono esportate in sistemi esterni quando si inviano informazioni tramite integrazioni HL7 a sistemi esterni relative a documenti, addebiti o appuntamenti. {474443}

**AVVERTENZA!**

Integrazione del riepilogo della registrazione del trattamento. L'integrazione del riepilogo della registrazione del trattamento fornita da RayCare conterrà solo i dati sul volume per i volumi di radioterapia creati in RayStation con un NominalDoseProgress corrispondente in RayCare. Ciò significa che potrebbero esserci più volumi di quelli rappresentati nei dati esportati che hanno ricevuto il dosaggio durante il trattamento e l'utente deve esserne consapevole durante la revisione dei riepiloghi dei trattamenti esportati da RayCare nel sistema esterno. {1014071}

**AVVERTENZA!**

Le integrazioni dei dati in entrata devono essere convalidate dalla clinica. Quando un'integrazione in entrata è abilitata in RayCare, il cliente deve accertarsi che l'integrazione funzioni come previsto con il sistema esterno e che i dati importati siano stati importati correttamente in RayCare. Il cliente deve inoltre riconvalidare tutte le integrazioni in entrata se RayCare è stato aggiornato a una versione più recente per assicurarsi che funzioni correttamente. {1013580}

**AVVERTENZA!**

I canali o il codice Mirth non possono essere modificati dalla clinica. Solo il personale RaySearch può rettificare o modificare i canali e il codice distribuiti in Mirth. Le modifiche non approvate potrebbero avere conseguenze inaspettate per l'integrazione delle cliniche e possono portare all'importazione/esportazione di dati errati o addirittura al crash del sistema. {1014089}

**AVVERTENZA!**

I registri Mirth devono essere monitorati dalla clinica. Se è attiva un'integrazione esterna che utilizza il motore di integrazione Mirth, i registri Mirth devono essere monitorati dalla clinica oltre al regolare monitoraggio sanitario RayCare. Errori specifici dell'elaborazione di canali/messaggi potrebbero verificarsi solo nei registri Mirth e potrebbero non essere rilevati attraverso il monitoraggio dello stato di salute RayCare; è quindi importante che il personale IT della clinica monitori anche i registri Mirth. {1014175}

Altri problemi noti relativi alle integrazioni con sistemi esterni

- Quando le informazioni sull'assicurazione vengono importate e aggiornate in RayCare tramite HL7, i dettagli del titolare della polizza non vengono visualizzati in RayCare. Solo gli amministratori di sistema possono accedere a queste informazioni facendo doppio clic sull'assicurazione. {574332}
- L'esportazione del riepilogo del trattamento in un sistema esterno viene attivata solo quando il trattamento è stato completato in RayStation o RayTreat. {1013544}
- I documenti e i moduli configurabili dall'utente non possono essere esportati in un sistema esterno utilizzando l'interfaccia documenti HL7. Esportare i documenti come PDF e importarli manualmente nel sistema esterno. {1068133}
- Per l'utente non viene visualizzato alcun avviso quando viene aggiunta un'allergia a un farmaco attivo utilizzando l'interfaccia ADT HL7. Assicurarsi di verificare regolarmente i farmaci e le allergie del paziente. {1068761}

3.2.10 Avvisi e problemi noti relativi agli script



AVVERTENZA!

Validazione degli script RayCare o RayWorld. RayCare fornisce alle strutture ospedaliere una funzione per sviluppare script in grado di leggere e modificare i dati RayCare selezionati. È responsabilità della singola validare tutti gli script RayCare e verificarne il corretto utilizzo, gestendo eventuali errori. {366877}



AVVERTENZA!

Gli script RayCare vengono convalidati per l'accesso e la modifica dei dati RayCare. Se gli script RayCare vengono utilizzati per l'accesso o la modifica di altre sorgenti di dati rispetto ai dati RayCare, la struttura ospedaliera sarà ritenuta responsabile di qualsiasi effetto provocato dagli script su altri sistemi. {366887}



AVVERTENZA!

Se uno script RayCare o RayWorld ha esito negativo, i dati interessati dall'esecuzione dello script non verranno reimpostati. Controllare sempre le esecuzioni degli script con esito negativo, per verificare che i dati RayCare non si trovino in uno stato inatteso. {370678}

Altri problemi noti relativi agli script

- Le azioni di script eseguite dagli script RayWorld eseguiti nel servizio in background di RayStation non vengono eseguite con l'indicazione dell'utente che ha richiesto lo script. (473788)
- Evitare di modificare o aggiungere script RayCare durante l'esecuzione di script RayCare di lunga durata per un paziente. In caso contrario, ciò potrebbe fare sì che RayCare visualizzi "System maintenance required" (Manutenzione del sistema richiesta) e disconnetta gli utenti durante l'esecuzione dello script. (1068612)

3.2.11 Avvertenze e problemi noti relativi all'amministrazione del sistema



AVVERTENZA!

Validazione della configurazione specifica della struttura ospedaliera. La struttura ospedaliera è tenuta a verificare che la configurazione di RayCare specifica della struttura funzioni come previsto in un ambiente non clinico prima dell'uso clinico. A tal fine, deve validare la funzionalità di flussi di lavoro, attività, appuntamenti, documenti e set di valori RayCare. (14764)



AVVERTENZA!

La modifica dei set di codici e dei set di valori influirà sul comportamento di RayCare. Prestare attenzione quando si gestiscono set di codici e set di valori come diagnosi o codici di registrazione spese, poiché le modifiche dei set di valori avranno effetto sulle opzioni disponibili per l'utente in RayCare. Tutte le modifiche ai set di valori nell'interfaccia utente devono essere convalidate dalla struttura ospedaliera, se necessario. (51793)



AVVERTENZA!

I nomi dei dispositivi di trattamento in RayCare e RayTreat devono corrispondere. Il nome del dispositivo di trattamento in RayCare deve essere lo stesso utilizzato in RayTreat. (58255)



AVVERTENZA!

L'aggiornamento dei modelli non comporta l'aggiornamento delle istanze già create in base al modello. Lo spazio di lavoro di amministrazione contiene varie funzioni basate su modelli configurati da RaySearch (modelli per attività, flussi di lavoro e documenti) o dalle strutture ospedaliere (contrassegni). L'aggiornamento di uno qualsiasi di questi modelli non comporterà l'aggiornamento dei modelli per attività, flussi di lavoro e documenti o dei contrassegni in RayCare. Ad esempio, un contrassegno o uno studio clinico aggiunto a un paziente in base a un modello non verrà aggiornato quando il modello viene aggiornato. {8183}



AVVERTENZA!

Le risorse disattivate non verranno rimosse dalle attività o dagli appuntamenti assegnati. La disattivazione di utenti, team, gruppi, dispositivi, posizioni o dell'organizzazione non comporterà la rimozione di questi oggetti dalle attività o dagli appuntamenti a cui sono stati precedentemente assegnati. Dopo la disattivazione, la struttura ospedaliera deve riassegnare eventuali attività o appuntamenti alle risorse attive. Le risorse disattivate non potranno essere selezionate per una nuova assegnazione. {58785}



AVVERTENZA!

Database dei report RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile della generazione e della convalida dei report. Inoltre, è tenuta a tenere un registro degli accessi al database dei report. {97061}



AVVERTENZA!

La modifica degli oggetti di dominio esteso influirà sul comportamento dei template dei moduli e dei moduli. Prestare attenzione quando si aggiornano oggetti di dominio esteso. Eventuali modifiche verranno aggiornate direttamente nei template dei moduli e nei moduli utilizzati attivamente. {574101}

**AVVERTENZA!**

Gli oggetti di dominio esteso condividono dati tra diversi documenti. Gli oggetti di dominio esteso sono progettati per estendere la possibilità di archiviazione strutturata dei dati per i dati specifici del paziente. I dati negli oggetti di dominio esteso specificati dall'utente verranno condivisi tra documenti diversi.

Quando si imposta il livello di contesto (paziente, caso o piano di cura) sugli oggetti di dominio esteso, l'utente deve essere consapevole del fatto che gli oggetti di dominio esteso verranno condivisi tra tutti i documenti dello stesso livello di contesto o di livelli più specifici quando il documento viene completato o approvato. A seconda della configurazione dell'oggetto di dominio esteso, varranno le seguenti indicazioni:

- Gli oggetti di dominio esteso a livello di paziente condivideranno i dati con tutti i documenti relativi a quel paziente.
- Gli oggetti di dominio esteso a livello di caso condivideranno i dati con i documenti dello stesso caso e con i documenti relativi ai piani di cura appartenenti a quel caso.
- Gli oggetti di dominio esteso a livello di piano di cura condivideranno i dati solo con documenti dello stesso piano di cura.

Quando si crea il documento dalla cartella clinica, all'utente verrà richiesto di inserire le informazioni sul contesto, ad esempio il caso e/o il piano di cura in base alle esigenze. {573616, 686660}

**AVVERTENZA!**

Evitare duplicazioni tra oggetti di dominio e oggetti di dominio esteso RayCare.

Per ogni versione RayCare, l'utente deve esaminare gli oggetti dominio RayCare per identificare la duplicazione rispetto a oggetti di dominio esteso definiti dalla struttura ospedaliera. Se vengono identificati dei duplicati, la struttura ospedaliera dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo dell'oggetto di dominio RayCare invece dell'oggetto di dominio esteso per evitare di avere due origini degli stessi dati. {573748}

**AVVERTENZA!**

Il database dei report contiene i dati rimossi dall'utente. Quando si costruiscono query per accedere ai dati dal database dei report, l'utente deve considerare lo stato di ogni elemento. {573997}



AVVERTENZA!

Utilizzo di database aggiuntivi ai fini di reporting. La struttura ospedaliera può aggiungere altri database al server SQL RayCare esclusivamente per esigenze di reporting collegate a RayCare. I database aggiunti non devono contenere “raycare” nel proprio nome. Qualunque database aggiuntivo non rientrerà nei backup RayCare e a seguito di un ripristino di emergenza potrebbe non essere sincronizzato con il database dei report RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile del backup dei database aggiuntivi. {628722, 628723, 684736}



AVVERTENZA!

Le prestazioni di RayCare possono essere influenzate dall'esecuzione di query sui database dei report . Interrogare il database dei report potrebbe causare peggioramenti delle prestazioni di RayCare dal momento che il database dei report è attivo sullo stesso server SQL di tutti gli altri database RayCare. La struttura ospedaliera è responsabile di qualunque ripercussione sulle prestazioni che le richieste di report potrebbero causare sul server SQL. In caso di richieste di report avanzate quando le prestazioni potrebbero venir compromesse, si consiglia di riprodurre il database dei report su un altro server SQL e inviare tutte le richieste a tale copia del database. {628726, 628727}



AVVERTENZA!

Importazione di template di documenti con oggetti di dominio estesi. Quando un template di documento RayCare viene importato nel sistema, l'oggetto di dominio esterno incluso nel template di documento viene mappato a un oggetto di dominio esteso esistente nel sistema se ha lo stesso nome. L'utente deve convalidare il template di documento dopo l'importazione. {1014188}

Altri problemi noti relativi all'amministrazione del sistema

- Un documento RayCare non può essere configurato con più di un oggetto di dominio RayCare dello stesso tipo. {686304}
- Quando si lavora alla configurazione dei modelli di documento con numerosi campi con riferimenti a oggetti di dominio RayCare o oggetti di dominio esteso, talvolta RayCare potrebbe bloccarsi. {688494}

- Quando si visualizza o si modifica un template di modulo nello spazio di lavoro Administration (Amministrazione), non viene visualizzata alcuna anteprima delle attività per le attività aggiunte a un modulo utilizzando un'attività predefinita. L'attività verrà indicata con un simbolo di lucchetto. L'anteprima dell'attività viene visualizzata quando si visualizza l'attività configurata dallo spazio di lavoro Activity (Attività). {1012112}
- Quando si configura un nuovo modulo o una nuova attività, è possibile aggiungere un'attività modulo predefinita. Quando l'attività modulo viene aggiunta a un modulo o a un'attività su un livello meno specifico, il campo di selezione del template di modulo collegato sarà vuoto. Evitare di aggiungere un'attività modulo a un modulo o a un'attività a un livello meno specifico. {1068464}
- Quando viene specificato un team predefinito per un modulo durante la configurazione del flusso di lavoro, non è possibile rimuovere il team predefinito da un'attività definita nel modulo. Non utilizzare un team predefinito quando a un'attività nel modulo non deve essere assegnato un team. {749315}
- I percorsi di attività non supportati sono disponibili per la configurazione del flusso di lavoro, il che porta a uno stato sconosciuto quando si utilizza l'attività per la configurazione del flusso di lavoro RayCare Flow. {1068689}
- In RayCare Flow, le attività possono essere configurate per l'instradamento verso spazi di lavoro che non sono disponibili in RayCare Flow. Questi percorsi di attività non devono essere utilizzati nella configurazione del flusso di lavoro. Inoltre, è possibile configurare i template di intento di trattamento nello spazio di lavoro di amministrazione RayCare Flow. Questi template non saranno disponibili in RayCare Flow. {1068073}
- Un programma esterno configurato per aprire i file .txt non verrà aperto come previsto. Verrà invece avviato il programma predefinito per il file specifico a livello di sistema. {1067920}
- RayCare potrebbe bloccarsi durante l'importazione di un template di documento con un campo immagine statico quando il nome del file di immagine include caratteri speciali come ß o ü. Evitare caratteri speciali nei nomi dei file di immagine utilizzati nei template di documento. {1069541}
- È possibile modificare la categoria e il percorso dei template di attività di revisione delle immagini offline e attivare il template nell'interfaccia utente di amministrazione RayCare. Dopo avere fatto ciò, non sarà possibile aggiungere attività al flusso di lavoro di un paziente. Evitare di modificare la categoria o l'instradamento sui template di attività di revisione delle immagini offline. {1069514}
- Il client RayCare potrebbe bloccarsi quando si aggiunge un'attività per la revisione delle immagini offline a un template di modulo di flusso di lavoro nell'interfaccia utente di amministrazione. Se si verifica l'arresto anomalo, l'utente corrente viene disconnesso. L'attività viene aggiunta correttamente al template del modulo di flusso di lavoro e l'utente può continuare la configurazione dopo avere effettuato nuovamente l'accesso. {1130650}

3.2.12 Avvisi e problemi noti relativi all'ambiente di sistema



AVVERTENZA!

Se i servizi RayCare vengono riavviati, le modifiche potrebbero andare perse. In caso di riavvio di uno dei servizi RayCare, le azioni più recenti dell'utente prima del riavvio potrebbero non essere state salvate e di conseguenza andranno perse. [11626]



AVVERTENZA!

Configurazione del fuso orario. La configurazione del fuso orario deve essere la stessa per tutti i server RayCare e RayStation e deve essere impostata sul fuso orario locale. Anche le modalità di imaging e i dispositivi di erogazione del trattamento collegati a RayCare devono essere configurati con il fuso orario locale. [15336]



AVVERTENZA!

La struttura ospedaliera non deve tentare di modificare o aggiornare i database RayCare. Solo il personale RaySearch autorizzato può aggiornare o modificare i database RayCare. [61621]



AVVERTENZA!

Configurazione di RayCare e RayStation. Se RayCare e RayStation sono configurati per fornire funzionalità integrate di pianificazione ed erogazione del trattamento, devono essere entrambi in versione clinica. Non tentare mai di utilizzare una versione clinica di RayCare con una versione non clinica di RayStation. [13790]



AVVERTENZA!

Utilizzare versioni compatibili di RayCare e RayStation. Quando si utilizza RayCare con RayStation, le versioni dei prodotti devono essere compatibili. Utilizzare RayCare 6A solo con RayStation 12A e service pack successivi validati. Verificare le specifiche versioni rivolgendosi all'assistenza RaySearch. [15608]

**AVVERTENZA!**

Proprietà utente da Active Directory. RayCare supporta la gestione utente tramite Active Directory e anche la sincronizzazione di un sottoinsieme di proprietà utente gestite in Active Directory. Non tutte le proprietà vengono sincronizzate. Solo il nome dell'utente, lo user name, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare vengono sincronizzati da Active Directory a RayCare. {16805}

**AVVERTENZA!**

La struttura ospedaliera non deve utilizzare nessuno degli strumenti a riga di comando inclusi nell'installazione di RayCare. Solo il personale RaySearch autorizzato può utilizzare gli strumenti a riga di comando inclusi nell'installazione di RayCare. {55431}

**AVVERTENZA!**

La struttura ospedaliera non deve modificare i file di configurazione del sistema RayCare. Solo il personale RaySearch autorizzato può modificare i file di configurazione del sistema RayCare. {61620}

**AVVERTENZA!**

Il monitoraggio deve essere controllato e aggiornato dopo l'upgrade. Dopo un upgrade di RayCare, la struttura ospedaliera è tenuta a verificare che il monitoraggio sia aggiornato e soddisfi le istruzioni di monitoraggio della nuova versione. Prestare particolare attenzione a qualsiasi monitoraggio specifico per un servizio, poiché il set di servizi potrebbe cambiare tra le release. {149554}

**AVVERTENZA!**

I piani di backup del database devono essere aggiornati dopo l'upgrade. Dopo un upgrade di RayCare, la struttura ospedaliera è tenuta a verificare che i piani di backup siano aggiornati e soddisfino le istruzioni di backup della nuova versione. Prestare particolare attenzione alle attività specifiche per i database, poiché il set di database potrebbe cambiare tra le release. {149553}



AVVERTENZA!

Accesso utente vietato durante l'aggiornamento o la manutenzione. È responsabilità della struttura ospedaliera garantire che gli utenti non accedano a RayCare, RayTreat o RayStation durante le operazioni di aggiornamento o manutenzione. {226192}



AVVERTENZA!

La clinica non deve ripristinare i database RayCare senza il supporto del personale RaySearch. Tutti i ripristini dal backup devono essere supervisionati da personale autorizzato RaySearch. Se compaiono anomalie dopo il ripristino, contattare il personale autorizzato RaySearch. {15094}



AVVERTENZA!

L'organizzazione deve avere la stessa configurazione di fuso orario sia per i server che per i client. Nella gestione delle risorse è possibile creare una sola organizzazione, che deve utilizzare lo stesso fuso orario del sistema RayCare. {61511}

3.2.13 Avvertenze e problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati



AVVERTENZA!

Automatizzazione delle attività nei cicli di revisione dopo l'aggiornamento. Le attività configurate in precedenza per essere assegnate automaticamente all'utente al quale era stata assegnata un'attività prima di una revisione, non saranno più riassegnate automaticamente dopo l'aggiornamento da RayCare 5A o versioni precedenti a RayCare 5B o versioni successive. L'attività deve essere assegnata manualmente tramite la finestra di dialogo Edit task (Modifica attività) o l'elenco delle attività RayStation. {685610}

**AVVERTENZA!**

Dopo l'aggiornamento, le attività basate sui dati possono essere manuali. Alcune attività configurate per essere completate tramite l'aggiunta di dati devono essere completate manualmente dopo l'aggiornamento da RayCare 5A o da versioni precedenti a RayCare 5B. Ciò vale per le attività relative ai dati nella cartella clinica o RayStation in assegnazione al piano di cura, al piano di trattamento o ai contesti di set di fasci anziché al contesto del caso. (688186)

**AVVERTENZA!**

Eliminazione dei punti fissi delle date di scadenza dopo l'aggiornamento. I punti fissi delle date di scadenza specificati sui moduli del flusso di lavoro o basati sulle attività relative al punto fisso della data di scadenza andranno persi durante l'aggiornamento da RayCare 5A o versioni precedenti a RayCare 5B o versioni successive. I punti fissi delle date di scadenza non saranno disponibili nelle proprietà del flusso di lavoro nello spazio di lavoro Workflow management (Gestione del flusso di lavoro). Le date di scadenza sulle attività che dipendono dai punti fissi delle date di scadenza devono essere aggiornate manualmente tramite la finestra di dialogo Edit task (Modifica attività). (685628)

Problemi noti per la sicurezza del paziente relativi ai sistemi RayCare aggiornati

- Le attività di revisione delle immagini offline (OIR) che sono state inserite tramite la funzione "Insert task" nelle versioni precedenti di RayCare, dopo l'aggiornamento a 5A RayCare non saranno collegate agli elementi OIR nello spazio di lavoro OIR. Il cambiamento dello stato o l'aggiunta di commenti a tali attività OIR non verranno rispecchiati dagli elementi OIR e vice versa. Prima di eseguire l'aggiornamento a RayCare 5A o alle versioni successive alla 5A, verificare con attenzione che tali attività non siano presenti in flussi di lavoro attivi e valutare la possibilità di aggiungere un'osservazione alle attività coinvolte. (370135)

Altri problemi noti relativi ai sistemi RayCare aggiornati

- La funzionalità dell'intento del trattamento non supporta più l'immissione di informazioni sulla somministrazione della dose per i siti di trattamento. Queste informazioni devono ora essere immesse tramite lo spazio di lavoro Prescriptions (Prescrizioni). Per gli intenti di trattamento creati prima di RayCare 6A, le informazioni di somministrazione della dose per i siti di trattamento saranno disponibili nel campo Description (Descrizione) dopo l'aggiornamento a RayCare 6A. Tutti i valori verranno visualizzati in cGy. (574321)

- Grazie alla configurazione del flusso di lavoro, è possibile configurare una serie di appuntamenti per il trattamento per ciascun modulo di erogazione del trattamento. Non è possibile creare altre serie di appuntamenti. {686588}
- Il ritardo previsto per l'inizio del trattamento, ossia il tempo che passa dalla selezione del modulo alla data target per l'avvio del trattamento, configurato nella programmazione del trattamento o nel modulo di erogazione del trattamento, è stato rimosso. Di conseguenza, i consigli sulla programmazione relativi agli appuntamenti per il trattamento saranno diversi dalle versioni RayCare precedenti. Modificare gli appuntamenti consigliati in base alle esigenze. {683952}
- I piani di trattamento e i set di fasci esistenti in RayCare non riceveranno osservazioni, modelli di macchina o linee di fasci dai piani e set di fasci corrispondenti nel set RayStation dopo l'aggiornamento da RayCare 5A o versioni precedenti a RayCare 5B o versioni successive. Verranno visualizzati i valori corretti in RayCare dopo che il paziente è stato aggiornato in RayStation dopo l'aggiornamento della versione. {683908}
- Le regole relative alla lunghezza massima dei campi di inserimento testo selezionati in RayCare sono state modificate per evitare che i valori di testo siano troppo lunghi. Alcuni valori potrebbero essere stati abbreviati nelle relative tabelle del database dei report in caso eccedessero la lunghezza prevista nella nuova regola. I valori abbreviati sono chiaramente segnalati nel database dei report. {685682}
- Le attività configurate per essere collegate automaticamente ai documenti quando il documento viene creato non saranno più collegate al documento. Invece, l'utente deve aggiungere l'attività tramite il menu di selezione del documento. {685193}
- Non è possibile configurare un modulo flusso di lavoro affinché sia compatibile con un modulo flusso di lavoro disattivato. Tutti i moduli vengono disattivati in fase di aggiornamento da RayCare 5A o versioni precedenti a RayCare 5B o versioni successive. I moduli possono essere configurati senza alcun requisito di compatibilità. {686565}
- La data modificata per i piani di trattamento creati in RayCare 4A, o in precedenza, viene visualizzata nello spazio di lavoro Plan overview (Panoramica del piano) con il valore predefinito 1 gennaio 1970. {688498}
- L'utente che ha salvato e approvato le istruzioni di pianificazione nelle versioni RayCare precedenti verrà visualizzato come utente che ha firmato le istruzioni di pianificazione sull'icona delle informazioni in RayCare 6A. {1014845}
- Dopo l'aggiornamento a RayCare 6A, non è possibile impostare lo stato dell'attività su Approved (Approvato) dall'elenco delle attività del pannello di sinistra della cartella paziente. Lo stato dell'attività può essere impostato su approvato nella finestra di dialogo Edit task (Modifica attività). {1068985}
- I trigger pronti per le attività non riapriranno più le attività già completate dopo l'aggiornamento a RayCare 6A. Esaminare i trigger pronti e aggiungere i trigger di riapertura secondo esigenza. {1068055, 1014192}
- Dopo l'aggiornamento a RayCare 6A, le attività inseribili configurate per essere basate sui dati verranno completate dai dati. {1067904}

- Dopo l'aggiornamento a RayCare 6A, il filtro degli avvisi di trattamento sulla lavagna Treatment [Trattamento] potrebbe visualizzare le righe dei risultati con un avviso di trattamento quando la frazione di trattamento è stata completata anche se l'avviso di trattamento non è più visualizzato sulla lavagna. {1069407}
- Dopo l'aggiornamento a RayCare 6A, la visualizzazione dei documenti RayCare contenenti caratteri speciali utilizzati nella formattazione di markdown può differire da quella delle versioni precedenti di RayCare. I caratteri speciali potrebbero essere stati convertiti in formattazione del testo dopo l'aggiornamento, ad esempio, quando si utilizza '*' o '-', quindi il testo sarebbe in grassetto o puntato dopo l'aggiornamento. {1069417}
- Dopo l'aggiornamento a RayCare 6A, la tabella degli avvisi di trattamento nel database dei report potrebbe contenere un avviso di trattamento per i set di fasci in cui tutte le frazioni di trattamento sono state completate, anche se l'avviso di trattamento non è più visualizzato in RayCare {1069431}.

4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI RAYCARE

Il sistema RayCare deve essere installato e configurato solo da personale RaySearch autorizzato.

Le fasi di preparazione dell'installazione, comprese le specifiche hardware e la configurazione, devono essere discusse e concordate con RaySearch. Per istruzioni dettagliate sui preparativi e i prerequisiti dell'installazione descritti di seguito, contattare RaySearch.

I servizi RayCare si basano sulla piattaforma Microsoft .NET e richiedono una versione specifica del runtime Microsoft .NET per essere presenti sul server. RayCare richiede una configurazione server specifica e una configurazione specifica per gli utenti sui server e nell'Active Directory configurata. RayCare richiede diversi certificati per il suo normale funzionamento e tali certificati devono essere ottenuti prima dell'installazione.

Tutti i dati RayCare, ad eccezione delle immagini DICOM, vengono memorizzati in un database Microsoft SQL Server. La versione del database deve essere 2016 o 2019 e la sua configurazione specifica deve essere quella richiesta da RayCare. Ciò include l'attivazione della crittografia della connessione e la configurazione del database con un modello di ripristino completo e l'abilitazione della registrazione delle transazioni.

Le immagini DICOM vengono memorizzate in un file system NTFS o UNC. I criteri di sicurezza e integrità dei dati per questo file system devono essere configurati in modo da soddisfare le linee guida di reparto appropriate per la crittografia e il backup. Le immagini DICOM possono essere archiviate in un archivio remoto. L'archivio remoto deve supportare il protocollo DICOM DIMSE per il trasferimento dei dati. Una volta avvenuto il trasferimento dei dati delle immagini nell'archivio remoto e ricevuta la conferma che l'archivio ha ricevuto i dati delle immagini, i dati delle immagini verranno rimossi da RayCare. L'archivio remoto deve supportare il salvataggio multiplo delle immagini DICOM.

RayCare ha un elevato livello di integrazione con RayStation e RayTreat. La configurazione di tutte le entità applicative DICOM utilizzate per il trasferimento di dati DICOM tra RayCare, RayStation e RayTreat deve essere eseguita da personale RaySearch autorizzato.

5 INTEGRITÀ E SICUREZZA DEL SISTEMA

Questo capitolo descrive i processi relativi all'integrità del sistema e alla sicurezza.

In questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

5.1	Monitoraggio e manutenzione del sistema	p. 58
5.2	Backup e ripristino	p. 58
5.3	Configurazione della sicurezza	p. 59

5.1 MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Per assicurarsi che RayCare mantenga le sue prestazioni nel tempo, è necessario monitorare l'utilizzo delle risorse sul server, per evitare che le risorse critiche si esauriscano. La memoria, la CPU e lo spazio disponibile su disco devono essere monitorati sui server che ospitano i servizi RayCare e sui server con applicazioni Citrix che ospitano i client RayCare. Se una determinata risorsa scarseggia, è necessario incrementarla.

La struttura ospedaliera è tenuta a monitorare il registro degli eventi e ad avviare azioni tempestive per risolvere eventuali errori. Se l'errore è contrassegnato come "Fatal" (Irreversibile), contattare immediatamente l'assistenza RaySearch. Gli errori irreversibili possono invalidare la disponibilità del sistema RayCare o di pazienti specifici in RayCare per un uso continuativo.

Se per l'archiviazione BLOB PACS si utilizza un percorso UNC (ad esempio, \\server/blob-storage), non è possibile controllare automaticamente lo spazio su disco in RayCare. La struttura ospedaliera deve dunque tenere traccia dello spazio disponibile su disco.

La struttura ospedaliera deve monitorare l'API sanitaria del servizio RayCare con un sistema di monitoraggio a sua scelta. Se vengono segnalati errori, è necessario contattare il personale RaySearch autorizzato.

RayCare scrive i registri di sistema per facilitare le attività di risoluzione dei problemi, se necessario. Poiché i file di registro possono acquisire dimensioni considerevoli nel corso del tempo, la struttura ospedaliera deve assicurarsi che i file di registro vengano periodicamente archiviati, per evitare l'esaurimento dello spazio su disco. Sul server che ospita i servizi RayCare, i file di registro da trasferire si trovano in %programdata%\RaySearch_Laboratories_AB\RayCare\archive.

Per il suo normale funzionamento, RayCare si basa su diversi certificati, che hanno una data di scadenza. Per evitare interruzioni impreviste del servizio, la struttura ospedaliera deve assicurarsi che le date di scadenza di tutti i certificati siano note e vengano rinnovate prima della scadenza.

5.2 BACKUP E RIPRISTINO

Per consentire il ripristino in caso di emergenza, è necessario eseguire periodicamente in un luogo sicuro il backup di tutte le informazioni memorizzate su RayCare, compresi i file con le informazioni di backup, che devono essere salvati insieme ai backup. I backup devono essere programmati in base alle specifiche fornite da RaySearch. Poiché RayCare memorizza le informazioni in più database, nel backup devono essere inclusi tutti i database e il file system NTFS o UNC utilizzati per memorizzare i dati delle immagini. Dopo un aggiornamento, è necessario aggiornare anche i piani di backup.

Durante la procedura di backup, RayCare crea dei checkpoint nei database. I checkpoint vengono creati a intervalli specifici, come spiegato nella documentazione di RaySearch. Questo documento descrive nel dettaglio la configurazione dei backup RayCare e può essere richiesto all'assistenza RaySearch. I checkpoint devono essere creati dopo un backup completo, ma prima del backup dei log delle transazioni. Il backup del log del database RayStationPatientDB deve avvenire subito dopo la creazione dei checkpoint. Se la creazione di un checkpoint non riesce per qualche motivo, è necessario eseguire un altro tentativo di creazione del checkpoint. Non è possibile ripristinare i dati utilizzando un checkpoint non riuscito e questa operazione non deve mai essere tentata. I checkpoint non devono mai essere creati durante il periodo di erogazione del trattamento.

Il backup delle immagini memorizzate nel file system NTFS o UNC deve essere eseguito dopo la creazione dei checkpoint, altrimenti non sarà possibile ripristinare correttamente RayCare PACS su RayCare. I dati delle immagini archiviati ed eliminati vengono spostati nel Cestino e vengono eliminati automaticamente dopo un numero di giorni configurabile. Il numero di giorni configurato nel Cestino deve superare il numero di giorni che intercorre tra i backup del database.

Se è necessario eseguire un ripristino del sistema, contattare il personale dell'assistenza RaySearch autorizzato. Il file system NTFS o UNC utilizzato per memorizzare i dati delle immagini deve essere sempre ripristinato al momento più recente rispetto al checkpoint di ripristino del database. Una volta avvenuto il ripristino dei dati delle immagini, i dati delle immagini presenti nel Cestino devono essere copiati manualmente nella loro posizione originale. Se RayCare è configurato con RayStation, i due sistemi devono sempre essere ripristinati allo stesso checkpoint per funzionare correttamente dopo il ripristino. Dopo il ripristino di un sistema, è responsabilità della struttura ospedaliera verificare che il sistema funzioni come previsto; eventuali anomalie devono essere valutate dal personale dell'assistenza RaySearch autorizzato.

5.3 CONFIGURAZIONE DELLA SICUREZZA

È necessario che i dati in movimento (connessioni SQL, comunicazioni HTTP) siano crittografati. È altamente raccomandato, e richiesto affinché l'installazione possa ottenere la conformità HIPAA, che anche i dati a riposo in SQL siano crittografati (utilizzando per esempio SQL TDE o BitLocker). Per rendere rilevabile la manomissione dei dati di controllo, è necessario abilitare i registri di controllo SQL nella tabella dbo.event del database dei registri di controllo (raycare_audit_write). Come misura aggiuntiva di limitazione dell'accesso ai database, i diritti di accesso ai database devono essere limitati agli account degli amministratori del servizio e del sistema. Quando si accede al database dei report RayCare, è necessario utilizzare il ruolo predefinito del database "ReadReportViews".

I backup RayCare possono essere crittografati per impedire l'accesso non autorizzato. A tal fine, vengono utilizzate chiavi di crittografia configurate in SQL Server. Per ripristinare correttamente un backup crittografato, l'utente deve avere accesso alle chiavi. La struttura ospedaliera è responsabile della gestione delle chiavi di crittografia per evitare perdite di informazioni.

Le connessioni DIMSE e HL7 non vengono crittografate dagli strumenti di sicurezza a livello di applicazione. La struttura ospedaliera è responsabile dell'utilizzo di un'ulteriore crittografia a livello di rete, come VPN o IPsec, per proteggere le comunicazioni per tali connessioni in base alle politiche di sicurezza della struttura ospedaliera stessa.

INDICE

C

Ciclo di vita 15

Contatti 11

D

Destinatari 10

Documentazione associata 8

E

Ente normativo incaricato 12

Etichetta 12

Etichetta del prodotto 12

N

Nome del prodotto 12

Numero di build 12

Numero di build del software 12

P

Precauzioni di sicurezza 18

S

Segnalazione degli errori 11

T

Tipologia di dispositivo 10

U

Uso previsto 10

V

Versione del prodotto 12



INFORMAZIONI DI CONTATTO



RaySearch Laboratories AB (publ)
Eugeniavägen 18
SE-113 68 Stockholm
Sweden

Contact details head office

P.O. Box 45169
SE-104 30 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 510 530 00
Fax: +46 8 510 530 30
info@raysearchlabs.com
www.raysearchlabs.com

RaySearch Americas

Phone: +1 877 778 3849

RaySearch France

Phone: +33 1 76 53 72 02

RaySearch Korea

Phone: +82 10 2230 2046

RaySearch Australia

Phone: +61 411 534 316

RaySearch Belgium

Phone: +32 475 36 80 07

RaySearch Germany

Phone: +49 30 893 606 90

RaySearch Singapore

Phone: +65 81 28 59 80

RaySearch China

Phone: +86 137 0111 5932

RaySearch Japan

Phone: +81 3 44 05 69 02

RaySearch UK

Phone: +44 2039 076791